



Einfach mobil.

scalamobil® scalacombi®

Mobile Treppensteighilfen



Einfach sicher
Treppensteigen.

www.alber.de



TÜV-geprüft
Ihre Sicherheit

„Endlich kommen wir mit dem Rollstuhl überall hin!“



Wieder barrierefrei – dank scalamobil und scalacombi

Einfach und sicher Treppen steigen – tausendfach bewährt

Jede einzelne Stufe wird zum Hindernis, wenn man aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht mehr selbstständig Treppen steigen kann: zu Hause, beim Arzt, in öffentlichen Gebäuden oder zu Besuch bei Freunden und Verwandten. Mit den mobilen Treppensteigern von Alber – scalamobil und scalacombi – werden verbaute Wege barrierefrei.


Und so funktioniert´s

Zwei elektrisch angetriebene Radpaare übersteigen kontinuierlich eine Treppenstufe nach der anderen – aufwärts oder abwärts. Dafür sorgt ein sanfter und zuverlässiger Steigmechanismus – von Alber patentiert. Treppab stoppen vier Sicherheitsbremsen scalamobil und scalacombi automatisch vor jeder Stufenkante. Die Begleitperson wählt die Steigrichtung und Geschwindigkeit aus. Während des Steigvorgangs muss sie den Treppensteiger nur in Balance halten. Der Elektromotor erledigt auf Knopfdruck die Steigarbeit.

Die Produktvorteile auf einen Blick

- Schafft auch enge und gewendelte Treppen – daheim und unterwegs
- Funktioniert auf jedem Treppenbelag: Holz, Stein, Metall oder Teppich
- Schont den Treppenbelag
- Ergobalance-Griffe für eine sichere Bedienung mit minimalem Kraftaufwand
- Bis zu 300 Stufen Reichweite mit einer Akku-Ladung
- Mit integrierter Sicherheitssensorik

scalamobil®

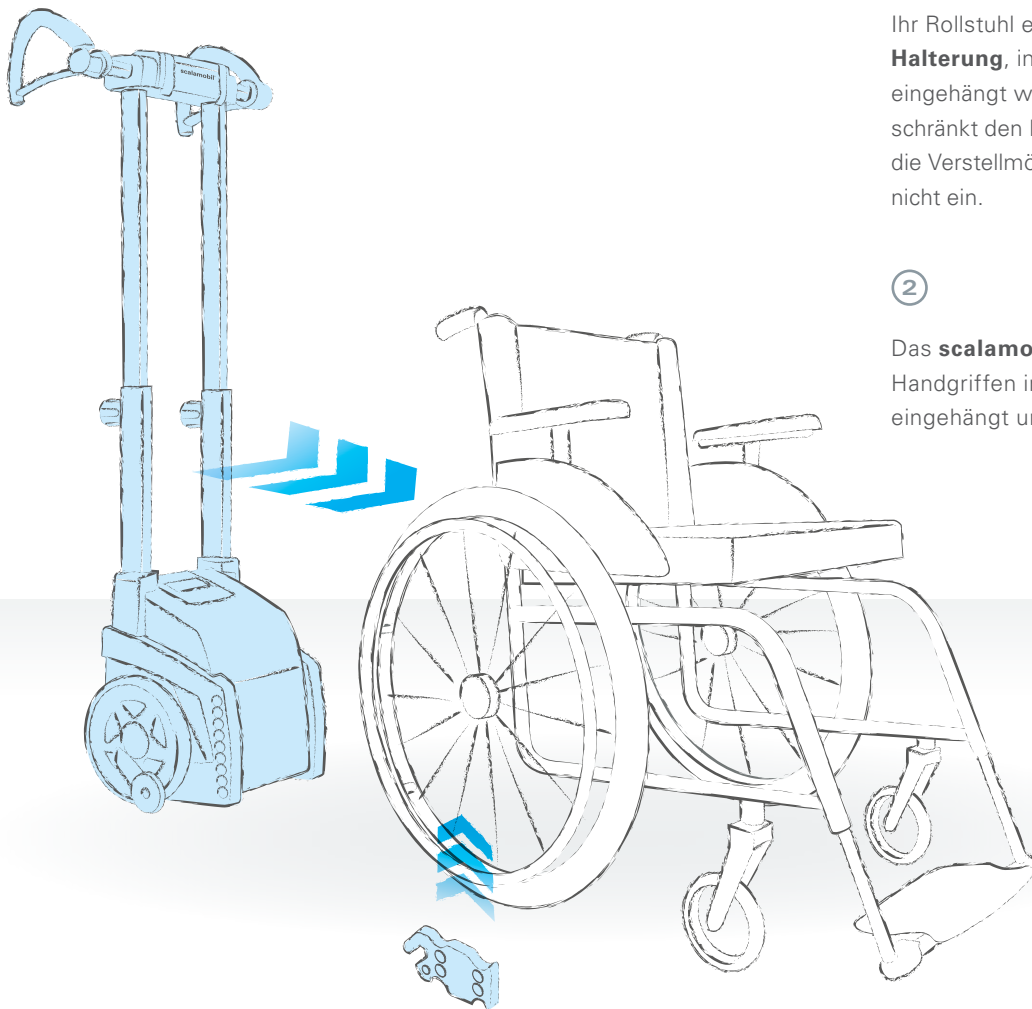

①

Ihr Rollstuhl erhält eine kleine **Halterung**, in die das scalamobil eingehängt wird. Die Halterung schränkt den Faltmechanismus oder die Verstellmöglichkeiten des Rollstuhls nicht ein.

②

Das **scalamobil** wird mit wenigen Handgriffen in die Rollstuhlhalterung eingehängt und gesichert.

Treppen steigen im eigenen Rollstuhl

Das scalamobil passt an die meisten handelsüblichen Rollstühle. Der große Vorteil: Sie können zum Treppensteigen in Ihrem Rollstuhl sitzen bleiben.



Universal-Adapter scalaport für den Transport unterschiedlicher Rollstühle ohne spezielle Halterung. Besonders für Fahrdienste und öffentliche Gebäude geeignet.



„Auf Knopfdruck Treppen steigen
und das ohne Kraftaufwand.“

scalacombi®

Treppen steigen mit integrierter Sitzeinheit

Sie benötigen Hilfe beim Treppensteigen, aber nicht unbedingt einen Rollstuhl? Der Treppensteiger scalacombi bringt Sie mühelos treppauf und treppab. Die kompakten Abmessungen und die lenkbaren Vorderräder machen das scalacombi äußerst wendig. So lässt es sich selbst in kleinen Räumen und auf engen Treppen bequem rangieren.

Wird das scalacombi gerade nicht benötigt, kann es platzsparend zusammengefaltet werden.

scalamobil und scalacombi sind auch als Sonderversionen für besonders hohe Treppenstufen (bis 25 cm) erhältlich. Für alle Versionen ist ein umfangreiches Zubehörprogramm (z. B. Gurtsysteme, Kopfstützen) verfügbar.



„Sicher und bequem
über jede Treppe – das
ist Lebensqualität.“





scalamobil und scalacombi – die besonderen Stärken

Intelligent und sicher

Höchste Sicherheit und Komfort beim Treppensteigen dank intelligenter Elektronik: scalamobil und scalacombi lassen sich auf die Gegebenheiten Ihrer Treppe zuhause programmieren und steigen dann besonders sanft und bequem.

Bedienungsfreundlich

Dank hervorragender Ergonomie sind alle Bedienelemente genau am richtigen Platz und der Treppensteiger liegt optimal in der Hand. Hier sieht und spürt man die mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung mobiler Treppensteiger bei Alber.





Vielseitig

scalamobil und scalacombi passen sich Ihnen an – nicht umgekehrt. Die Griffeneinheit ist in Höhe und Breite optimal für jede Bedienperson und Treppe einstellbar.



Ergobalance-Griffe: rutschsicher und handlich geformt



Übersichtliches Display: alle Funktionen im Blick



Komfortpolster: zum Ablegen der Bedieneinheit auf dem Oberschenkel



Handliche Technik für unterwegs

scalamobil und scalacombi sind überall einsetzbar. Im Handumdrehen lässt sich Ihr Treppensteiger in drei kompakte Einzelteile zerlegen und passt selbst in kleine Kofferräume.



Keine Sorge: Der einzigartige 48-Stunden Mobilitätsservice von Alber sorgt dafür, dass Sie bei einem Funktionsausfall innerhalb kürzester Zeit wieder mobil sind.

Der mit einem Handgriff entnehmbare Akku-Pack ist 3 kg leicht und bringt mit einer Ladung Energie für bis zu 300 Stufen.

scalamobil und scalacombi auf einen Blick

Gewicht	Antriebseinheit scalamobil: 17,9 kg Antriebseinheit scalacombi (inkl. Sitzeinheit): 29,9 kg Akku-Pack: 3 kg Griffeinheit: 4,9 kg
Reichweite/Akkuladung	Bis zu 300 Stufen mit einer Akkuladung.
Stufenmaße	Stufentiefe mindestens 11 cm Stufenhöhe maximal 20 cm (Optional Erweiterung der Steighöhe auf 25 cm.)
Maximales Personengewicht	140 kg*
Maximales Gesamtgewicht	180 kg* (scalamobil/scalacombi, Rollstuhl, Rollstuhlfahrer)

* In Abhängigkeit vom verwendeten Rollstuhl und von der Eignung der Bedienperson sind Einschränkungen möglich.

„Auch unterwegs können wir jetzt jede Treppe bewältigen!“



scalamobil – einfach zu zerlegen
und leicht zu transportieren

scalamobil und scalacombi sind von den Kostenträgern anerkannte **Hilfsmittel** und unter den Positionsnummern **18.65.01.1026 (scalamobil)** und **18.65.01.1027 (scalacombi)** im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet.

scalamobil und scalacombi sind CE-konform gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung (MDR) 2017/745 und sind auf freiwilliger Basis durch den TÜV Süd geprüft und zertifiziert, nach der aktuell gültigen Ausgabe der Produktnorm ISO 7176-28.

Unser Qualitätsanspruch: Ihre Sicherheit! Unser Unternehmen ist zertifiziert nach dem aktuellen Qualitätsmanagement-Standard ISO 13485 für Medizinprodukte. Die umweltgerechte Herstellung unserer Produkte stellen wir mit unserem Umweltmanagementsystem, zertifiziert nach ISO 14001, sicher.



MADE IN GERMANY 

„Wir haben
das
scalamobil
getestet und
waren sofort
überzeugt.“

Produktvorführung

Kostenlos! Terminvereinbarung unter:



0800 1224567 (gebührenfrei)



www.alber.de/scalamobil-testen

scalamobil Produktvideo

Gleich online anschauen:



Youtube



www.alber.de/scalamobil-film



Alber GmbH

Vor dem Weißen Stein 14
72461 Albstadt
Telefon 07432 2006-0
endkundenbetreuung@alber.de

www.alber.de

